



Еднократна процедура за избелване в кабинет

BlancOne TOUCH е еднократна процедура за избелване на зъби в кабинет, която само за 30 минути ще възвърне бързо и ефективно белотата на зъбите, без да се налага употреба на гингивална бариера и без поява на зъбна чувствителност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

А) Приготвяне на гела

1. Махнете капачките на двете спринцовки (избелващия гел и активирация гел). След това ги свържете заедно с помощта на конусния съединител.
2. Внимателно натиснете буталото на едната спринцовка, за да прехвърлите цялото съдържание на гела в другата спринцовка.
3. След това натиснете буталото на спринцовката с гела, за да го прехвърлите в празната спринцовка.
4. Повтаряйте горе описаните стъпки, докато двата гела (избелващ и активиращ) се смесят напълно и се получи хомогенна смес.
5. Махнете конектора от спринцовката с гел и поставете накрайника за нанасяне.

Б) Подготовка на пациента

1. Пациентът трябва да бъде обезопасен с BlancOne ретрактор с ограничител за езика и тогава да се поставят цилиндричните тампони под и над устните, да да ги изолират от зоната, която ще бъде третирана.
2. Да се премахне слоя от слюнка с четка; ако е необходимо нека се използва смес от вода и пемза. Да НЕ се използват полирни паста и продукти, които съдържат флуорид. Да се измие и подсуши.
3. Да се определи по скалата първоначалния цвят на зъбите на пациента

В) Процедура по избелване

1. Внимателно натиснете буталото на спринцовката, която съдържа избелващия гел, за да се нанесе гелът по повърхността на всички зъби, които ще бъдат избелени (1-2 мм равномерен слой).

2. Облъчете избелващия гел със синя светлина.



Веднъж активиран, гелът ще набъбне и изпълни с кислород (балончета), както е показано на снимката долу.



3. Премахнете излишния избелващ гел с помощта на цилиндричния памучен тампон и отстранете остатъците от гела, като изплакнете със спринцовка с вода/въздух.

ВНИМАНИЕ: Активираният гел ще бъде доста гъст.

В случай, че слюносмукателят се запуши, изсмучете гела и облейте с обилно количество вода.

4. Процедурата BlancOne TOUCH се състои от 3 избелващи цикъла в рамките на една сесия.

Повторете избелващия цикъл още 2 пъти. Би могъл да се добави четвърти цикъл, за стабилизиране на резултата.



Г) Приключване на процедурата

1. Премахнете гингивалната бариера. Използвайте спринцовка с вода / въздух, за да изплакнете повърхността на зъбите, като изсмучете всички остатъци от гел.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръбът на венеца може да бъде леко зачервен на някои места, но това е временен ефект, който ще изчезне за около час.

2. Използвайте скалата, за да определите финалния цвят на зъбите на пациента.

3. Махнете ретрактора и изплакнете зъбите на пациента.

Фотоактивация на гела

Геловите за избелване на зъби на BlancOne изискват употребата на подходящ източник на светлина за фотохимичната активация.

За да гарантираме идеален резултат на избелване, ние препоръчваме употребата на избелващ апарат BlancOne ARCUS. Той е оборудван с 10 мощни 5W LED излъчвателя, което гарантира пълното активиране на гела едновременно на двете зъбни дъги, включително и отстрани, за кратко време.

Главата на апарата BlancOne ARCUS трябва да бъде позиционирана перпендикулярно на зъбите на разстояние 5-10 см от устата, за да се осигури добра вентилация.

При използване на друг избелващ апарат е възможно ефектът от процедурата да е по-малък, да е необходимо по-дълго време за облъчване, както и невъзможност изобщо да се активира гелът.

Препоръчително време за активация:

Оборудване	Мощност	Вид активация	Време
BlancOne ARCUS	250mW/cm ²	Едновременно на двете зъбни дъги	8 минути

Предупреждения от Европейския съюз

- Освобождава се 5,6% водороден пероксид.
- Да не се използва при пациенти под 18 годишна възраст.
- Да се продава само на дентални практики.
- Да се използва само от дентални лекари или под техен пряк надзор, ако е осигурено еквивалентно ниво на сигурност.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Задължителен е стоматологичен преглед преди процедурата по избелване на зъби.
- Порцелановите корони и денталните obturации няма да се повлияят от избелването.
- Не използвайте тютюневи продукти, не пийте кафе или червено вино в продължение на поне 6 часа след приключване на процедурата.
- Да не се използва при бременни жени. Да се употребява при кърмещи жени само след направена консултация с доктор.
- Да не се поглъща гел. Да се избягва контакт с тъкани, различни от твърдите дентални тъкани (зъбите).
- Кисели храни/течности могат да предизвикат чувствителност, ако са консумирани скоро след приключване на процедурата по избелване.
- Може да се получи дразнене на венечната тъкан, ако процедурата по избелване е направена на пациент с пародонтоза.
- Кисели храни/течности могат да предизвикат чувствителност, ако са консумирани скоро след приключване на процедурата по избелване.
- Пазете избелващите продукти далеч от деца.
- Кисели храни / течности могат да предизвикат чувствителност, ако са консумирани скоро след приключване на процедурата по избелване.
- Избягвайте контакт с кожата, лигавиците и очите. В случай на контакт с ОЧИТЕ: изплакнете очите внимателно с вода в продължение на няколко минути и потърсете медицинска помощ. В случай на контакт с КОЖА / ЛИГАВИЦА: изплакнете с обилно количество вода. Ако се появи дразнене, потърсете медицинска помощ.
- В случай на поглъщане, в малко количество продуктът е безвреден. В противен случай потърсете медицинска помощ.
- Някои пациенти могат да почувстват чувствителност или дразнене на венеца. Докато тези симптоми са леки и преходни в повечето случаи, в някои случаи може да се наложи лечение от стоматолог.

